



# Psylaris

## Handleiding

# Inhoudsopgave


Inhoudsopgave.....	1
De headset .....	2
Aan- en uitzetten .....	2
Opzetten .....	3
Als de band loskomt.....	3
Als de bandarm loskomt .....	4
Opladen (2.5 uur).....	5
Onderhoud en bescherming .....	6
De controller .....	8
Wifi-verbinding maken .....	10

# De headset

De headset die hier gebruikt wordt is de **Oculus Go**; een mobiele standalone virtual reality headset die geen extra computer of mobiele telefoon vereist.

## Aan- en uitzetten

**Aanzetten** van de headset doe je door de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden totdat het scherm oplicht.

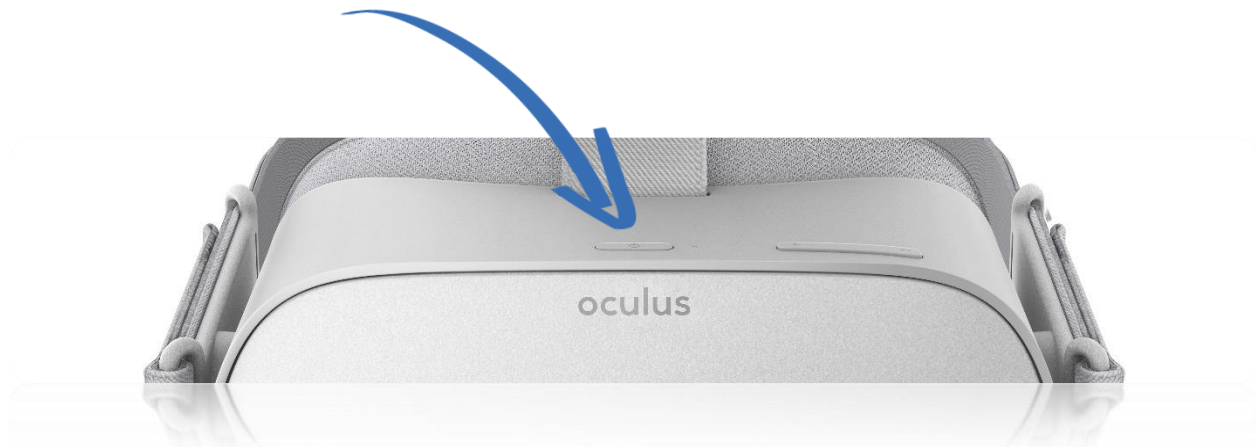

**Uitzetten** gaat als volgt:

1. Houd de **aan/uit-knop ingedrukt** terwijl je de Oculus Go headset op hebt totdat het afsluitscherm wordt weergegeven in VR.
2. Selecteer **Uitschakelen** in het afsluitmenu.


## Opzetten

Neem je tijd om de headset aan te passen naar wat voor jou comfortabel voelt. Dit hoeft niet lang te duren en maakt de ervaring een stuk aangenamer.

1. Maak de **banden aan de zijkant** en vervolgens de **bovenste band** los. Ga voorzichtig te werk wanneer je aan de banden trekt of deze afstelt. Als de banden aan de zijkant loskomen van je headset, kun je ze opnieuw bevestigen (Zie “Als de band loskomt” op blz. 4).
2. Zet de headset **van achter naar voren** op. Als je een bril draagt, zet je je headset van voren naar achter op.
3. Maak de **lipjes aan de zijkant** en vervolgens de **bovenste band** vast. Zorg dat de bandjes niet te strak zitten. De headset moet comfortabel passen en **niet te veel druk** uitoefenen op je gezicht en hoofd.
4. Houd met je handen **beide zijden** van je headset vast en beweeg je headset langzaam op en neer totdat het **beeld helder** is en de headset **comfortabel voelt**.


## Als de band loskomt

Geen paniek! Met de volgende stappen heb je de band in een handomdraai weer vastgemaakt.

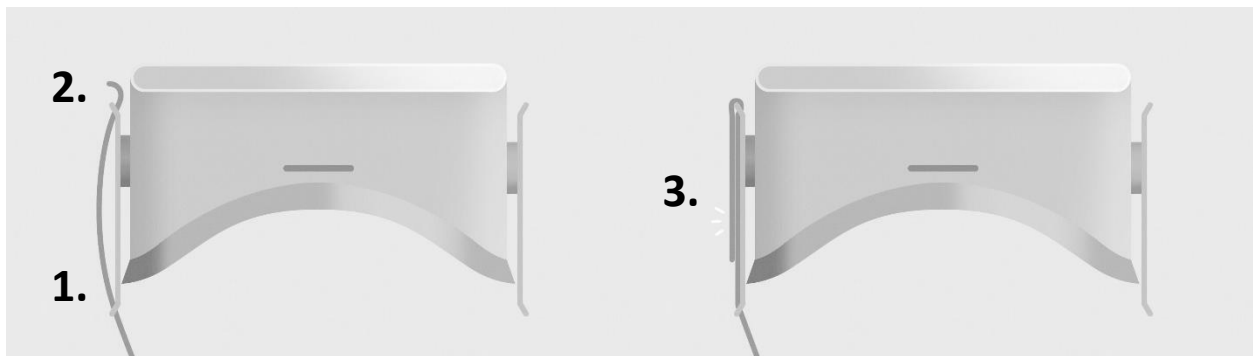

1. Haal de band door de onderste lus van je bandarm, zodat de stof van de versteller naar buiten is gericht.
2. Haal de band door de bovenste lus van de bandarm.
3. Vouw de band terug over de bovenste lus en druk deze op de gewenste lengte op de stof van de versteller.

## Als de bandarm loskomt

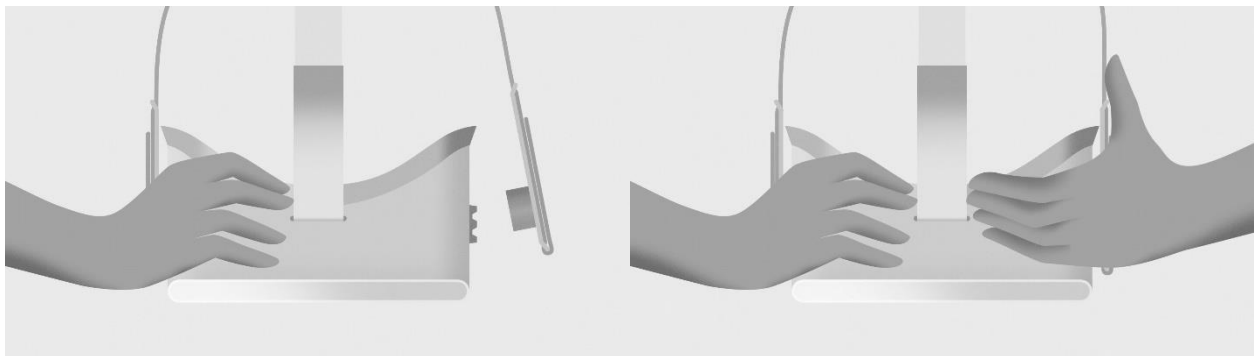

- Plaats de arm over de luidsprekerhouder met de voorste lus naar binnen gekanteld.
- Druk de arm stevig terug in de behuizing terwijl je de achterste lus richting de headset kantelt.

- Druk stevig totdat je de arm in de luidsprekerhouder hoort klikken.

Opmerking: Als je problemen ondervindt met het herbevestigen van de bandarm aan je headset, moet je mogelijk steviger drukken met de palm van je hand terwijl je de headset aan beide kanten vasthoudt.

## Opladen (2.5 uur)

Je Oculus Go moet worden opgeladen met de bijgeleverde USB 2.0 Micro-B-kabel en een USB-adapter die voldoet aan de volgende specificaties:

- 10 W (5 V 2 A) AC USB-adapter
- Alleen voor gebruik met classificatie IEC/EN 60950-1, invoer: 100-240 Vac/0,35 A, uitvoer: 5 VDC, 2 A max, dubbel geïsoleerd, met LPS-uitvoer of gelijkwaardig.

Een opgeladen headset gaat ongeveer 2.5 uur mee. We raden aan het een gewoonte te maken de headset tussen sessies door te laten opladen. Gebruik of draag de headset niet wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter of aan het opladen is.

<b>Kleur</b>	<b>Status-indicatie</b>
<b>Rood</b>	Lage batterij (minder dan 15%)
<b>Oranje</b>	Batterij is aan het opladen (minder dan 95%)
<b>Groen</b>	Batterij is aan het opladen (meer dan 95%)

# Onderhoud en bescherming

De lenzen van je Go-headset schoonmaken:

- Gebruik een **droge microvezeldoek** (inbegrepen) voor optische lenzen om de lenzen van je headset schoon te maken. Gebruik geen vloeibare of chemische schoonmaakmiddelen.
- Beweeg de doek vanuit het midden van de lens in een **cirkelbeweging** richting de buitenrand van de lens.

De controller schoonmaken:

- Gebruik een **droge doek of niet-schurende, antibacteriële schoonmaakdoekjes** om je afstandsbediening schoon te maken.
- Gebruik **geen** alcohol of agressieve schoonmaakmiddelen.

Beschadiging voorkomen:


- Leg de headset nooit in direct zonlicht om zo te voorkomen dat de lenzen en het beeldscherm beschadigd raken. Je headset kan permanent worden beschadigd door minder dan een minuut blootstelling aan direct zonlicht.
- Leg de headset niet in de buurt van scherpe voorwerpen (zoals uiteindes van kabels of sleutels) om krassen op de lenzen te voorkomen.
- Ga voorzichtig te werk bij het verstellen van de headset of de bandjes om te voorkomen dat je deze beschadigt.

- Gebruik of draag de headset niet wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter of aan het opladen is.
- Algemene schade voorkomen:
  - Leg de headset nooit op extreem warme plekken.
  - Leg de headset nooit in de buurt van hittebronnen.
  - Leg de headset nooit in de buurt van huisdieren of kleine kinderen.
  - Eet, drink of rook niet in de buurt van de headset.
  - Bewaar de headset op een veilige plek wanneer je deze niet gebruikt.



# De controller

Je kunt de controller gebruiken om het menu te **navigeren** en de app te **besturen**. De algemene functies van de knoppen op je controller zijn:

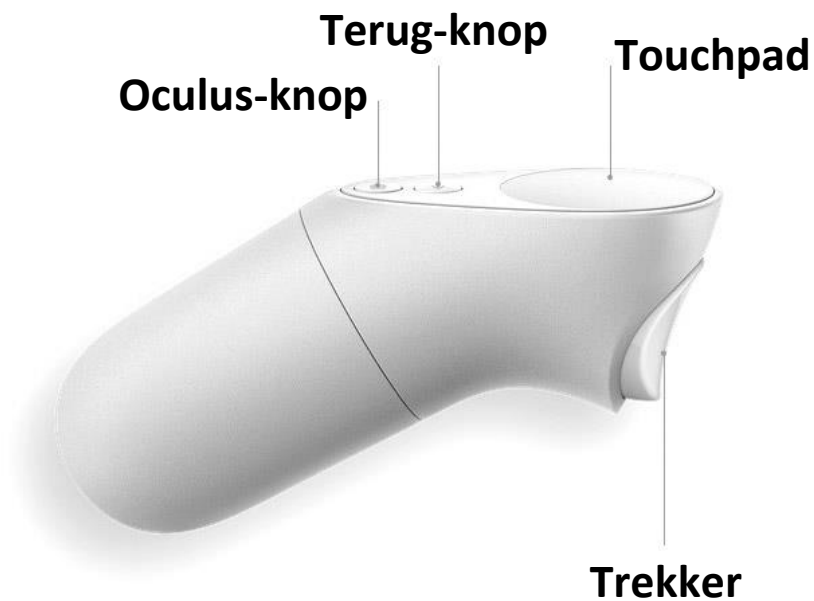

- **Trekker:** indrukken om iets te selecteren.
- **Touchpad:** indrukken om iets te selecteren of vegen om te bladeren.
- **Terug-knop:** indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm of menu.
- **Oculus-knop:** indrukken om terug te gaan naar Oculus Home of ingedrukt houden om de positie van je controller opnieuw in te stellen.

De **batterij** uit je Oculus Go-controller verwijderen:

1. **Verwijder de batterijklep** van de controller door voorzichtig aan het onderste gedeelte van de controller te trekken totdat dit los komt.
2. **Trek voorzichtig aan de batterij** aan de onderkant van de controller totdat deze loskomt en kan worden verwijderd.

Als je problemen ondervindt met het verbinden of koppelen van je Oculus Go-controller met je headset, kun je het volgende proberen:

1. Druk op een knop om de controller te activeren terwijl je de Oculus Go gebruikt.
2. Houd de Oculus-knop ingedrukt om de positie van de controller opnieuw in te stellen.
3. Houd de Oculus-knop en knop Terug ingedrukt totdat het lampje op de controller knippert en vervolgens gaat branden voor het opnieuw koppelen van de controller.
4. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw in je Oculus Go-afstandsbediening.

Opmerking: als het lampje van de Oculus Go-controller niet gaat branden, moet je mogelijk de batterij van de controller vervangen.



